

Algoritmo de productos Coloplast



INDICACIONES SEGÚN TIPO DE TEJIDO

	OBJETIVO	NIVEL EXUDADO	PROFUNDIDAD	TRATAMIENTO PREFERENTE	TRATAMIENTO ALTERNATIVO	
HERIDA AGUDA SUPERFICIAL	① Proteger		<u>No profunda</u>	Biatain® Contact + Biatain® Non-Adhesive	Comfeel® Plus Transparent	
Heridas crónicas: • UPP • Úlcera de pie diabético • Úlceras vasculares	Necrótico	① Hidratar ② Desbridamiento autolítico		<u>Superficial</u>	Purilon® + Biatain® Silicone <small>Pieles normales o frágiles</small>	Purilon® + Comfeel® Plus Transparent <small>Pieles muy frágiles</small>
	Esfacelos	① Desbridamiento autolítico ② Rellenar los espacios muertos ③ Gestión del exudado		<u>- de 2cm*</u>	Biatain® Silicone / Biatain® Silicone Non-Border <small>Pieles normales o frágiles</small>	Biatain® <small>Pieles muy frágiles</small>
	Granulación	① Gestión del exudado ② Proteger el tejido de granulación		<u>- de 2cm*</u>	Biatain® Silicone / Biatain® Silicone Non-Border <small>Pieles normales o frágiles</small>	Biatain® <small>Pieles muy frágiles</small>
	Epitelización	① Proteger el tejido recién formado ② Mantener las condiciones óptimas de temperatura y humedad		<u>- de 2cm*</u>	Biatain® Silicone Lite / Comfeel® Plus Transparent <small>Pieles muy frágiles</small>	Comfeel® Plus <small>Pieles normales o frágiles</small>
	PRESENCIA DE SIGNOS DE INFECCIÓN	① Manejar la carga bacteriana ② Rellenar los espacios muertos ③ Gestión del exudado		<u>- de 2cm*</u>	Biatain® Silicone Ag / Biatain® Alginate Ag <small>Pieles normales o frágiles</small>	Biatain® Ag <small>Pieles muy frágiles</small>
			<u>+ de 2cm</u>	Biatain® Alginate Ag + Biatain® Silicone Non-Border <small>Pieles normales o frágiles</small>	Biatain® Alginate Ag + Biatain® <small>Pieles normales o frágiles</small>	



Para más información sobre cómo valorar una herida con el **Triángulo de Evaluación de Heridas**



① Apósito primario ② Apósito secundario

*Los apósitos de Coloplast con Tecnología 3DFit se conforman al lecho de la herida hasta 2cm de profundidad; por tanto, no es necesario el uso de apósitos de relleno en estas heridas (exceptuando el caso de heridas tunelizadas y cavitadas)

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Urology Care
Coloplast Productos Médicos, S.A. Condesa de Venadito, 5, 4ª Planta - 28027 Madrid, España
www.coloplast.es. Coloplast es una marca registrada de Coloplast A/S. © PM-18977 Ref. 460N0D6396
Conoce nuestro blog www.menosdiasconheridas.com

Productos de Cuidado de Heridas Coloplast



Apósitos dispensables por el Sistema Nacional de Salud



Apósitos hidropoliméricos con Tecnología 3DFit®



Espumas de silicona

Biatain®Silicone



Ref.	C.N.	Tamaño
33436	492959	12,5x12,5 cm
33437	492934	15x15 cm
33438	492942	17,5x17,5 cm

Biatain®Silicone Sacro



Ref.	C.N.	Tamaño
33405	488114	25x25 cm

Biatain®Silicone Multishape



Ref.	C.N.	Tamaño
33408	467159	14x19,5 cm

Nuevo Biatain®Silicone Non-Border



Ref.	C.N.	Tamaño
9023	488932	12,5x12,5 cm
9025	488940	15x15 cm

Conformabilidad



Absorción vertical



Gran capacidad de retención



Espumas de silicona con Ag

Biatain®Silicone Ag



Ref.	C.N.	Tamaño
39638	488957	12,5x12,5 cm
39639	497842	15x15 cm



Único apósito con Complejo Zirconio Plata y Tecnología 3DFit.



Espumas con adhesivo de hidrocoloide

Biatain®Adhesive



Ref.	C.N.	Tamaño
3420	486852	12,5x12,5 cm
3421	486860	15x15 cm

Biatain®Adhesive Light



Ref.	C.N.	Tamaño
3433	488965	12,5x12,5 cm

Biatain®Adhesive Sacro



Ref.	C.N.	Tamaño
3483	488973	17x17 cm

Biatain®Adhesive Talón



Ref.	C.N.	Tamaño
3488	489187	19x20 cm

Biatain®Adhesive Contour



Ref.	C.N.	Tamaño
3486	496703	17x17 cm



Espumas sin adhesivo de hidrocoloide

Biatain®Non-Adhesive



Ref.	C.N.	Tamaño
3410	486472	10x10 cm
3411	489245	10x20 cm
3413	486480	15x15 cm

Biatain®Soft-Hold



Ref.	C.N.	Tamaño
3470	400128	10x10 cm
3472	400129	10x20 cm
3475	400130	15x15 cm

Otras espumas con Ag

Biatain®Ag Non-Adhesive



Ref.	C.N.	Tamaño
3454	496729	10x10 cm
3455	496737	15x15 cm

Biatain®Ag Adhesive Sacro



Ref.	C.N.	Tamaño
3521	400121	17x17 cm

Biatain®Ag Adhesive Talón



Ref.	C.N.	Tamaño
3523	400122	19x20 cm



Fibras de hidrocoloide

Biatain®Fiber




Ref.	C.N.	Tamaño
33506	482182	15x15 cm

Atrapa el exudado y las bacterias



Mínima retracción del apósito

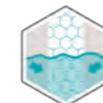

Gelificación altamente cohesiva



Fibras de alginato

Biatain®Alginate



Ref.	C.N.	Tamaño
3710	480681	10x10 cm

Fibras de alginato con Ag

Biatain®Alginate Ag



Ref.	C.N.	Tamaño
3765	480699	15x15 cm

Otros productos

Purilon®



Ref.	C.N.	Tamaño
3900	483925	15 gr
3903	485649	25 gr

Láminas de contacto

Biatain®Contact



Ref.	C.N.	Tamaño
33566	493502	15x15 cm

Poros más grandes



Mayor transparencia



Adherencia en una sola cara



Apósitos de hidrocoloide

Comfeel® Plus Transparent



Ref.	C.N.	Tamaño
33533	476697	10x10 cm
33539	467597	15x15 cm
33548	476705	5x25 cm

Comfeel® Plus



Ref.	C.N.	Tamaño
33146	461335	4x6 cm
33110	472597	10x10 cm
33115	472605	15x15 cm



Antimicrobiano



Se puede recortar



Indicado para piel frágil



Permite el aseo